

FICHA TÉCNICA

CLIN DHC

Desincrustante Alcalino

Clin DHC é um Detergente Líquido Alcalino, Concentrado, desenvolvido especialmente para limpeza e desincrustação de utensílios e instrumentos cirúrgicos.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto..... Líquido
pH11,50 ± 12,50

COMPOSIÇÃO:

Hidróxido de Sódio, Tenso Ativo Aniônico, Hidrotopo, Alcalinizante, Mistura de Isotiazolinoínas e Água.

Indicações de Uso:

É indicado como Detergente Desincrustante no processo de pré-lavagem e assepsia de instrumentos cirúrgicos em geral.

Modo de Usar:

- 1) Diluir o produto na proporção de até 1:50 (uma parte do produto em até quarenta e nove partes de água).
- 2) Imergir os instrumentos na solução, deixar de molho por cerca de 10 minutos. Em seguida, esfregar cuidadosamente com escova apropriada e em seguida enxaguar bem.

Composição:

Hidróxido de Sódio, Tenso Ativo Aniônico, Hidrotopo, Alcalinizante, Mistura de Isotiazolinoínas e Água.


Contém Tenso Ativo Biodegradável...

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Perigo. Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. **Primeiros Socorros:** **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. **NÃO** provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o **CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (0800-722-6001)**. Tratamento específico. **Advertências:**

Contém HIDRÓXIDO DE SÓDIO. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia.

Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem bem fechada e protegida do sol e do calor. Ao manusear o produto, abra cuidadosamente a tampa da embalagem, se possível com uso de utensílio específico.

Armazenamento: Armazenar em local limpo, seco, arejado e protegido do sol e do calor.

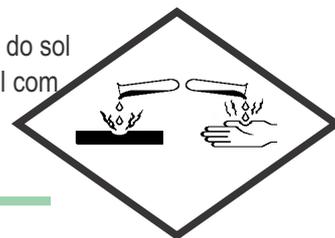

Clarín
Purificando ambientes

Produzido por Clarin Ind. e Comércio Ltda.

CNPJ: 07.031.403/0001-47 - Rodovia Alagoinhas - S/Nº - Centro - Inhambupe/BA - CEP: 48.900-000
Químico Responsável: Nivaldo Antônio Ferreira de Souza - CRQ: 0423053
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.452920/2012-01

SAC (75) 3431-2153 | producao@clarinba.com.br